

COLDISEPT

NANO SILVER

Nosový sprej

SK



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zdravotnícka pomôcka vo forme spreja potláča pocit suchej a podráždenej sliznice nosa a chráni ju pred škodlivými vonkajšími faktormi.

COLDISEPT nanoSILVER nosový sprej zvlhčuje a upokojuje nosovú sliznicu, podporuje jej regeneráciu a potláča pocit pálenia.

Prípravok obsahuje nanočastice striebra, ktoré potláčajú rast baktérií a plesní. Prípravok vytvára gélovú vrstvu, ktorá chráni pred baktériami a vírusmi a podporuje regeneráciu nosovej sliznice. Vlastnosti prípravku sú výsledkom pôsobenia minerálnych solí a rastlinného extraktu.

ZLOŽENIE

Čistená voda, nanočastice koloidného striebra, extrakt z riasy *Chondrus crispus* (írsky mach), sorbitol, glycerín, minerálne soli (dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý hexahydrát, chlorid horečnatý hexahydrát), benzoan sodný, kyselina citrónová.

POUŽITIE

Všetky prípady suchej a podráždenej nosovej sliznice, bez ohľadu na príčinu.

Použitie špeciálne v prípade:

- atrofickej nádchy (stenčená nosová sliznica);
- infekčnej alebo alergickej nádchy;
- používania liekov, ktoré poškodzujú epitel nosovej sliznice;
- zápalu dutín (sinusitída);
- pobytu v znečistenom a prašnom prostredí;
- vystavenia extrémnym teplotám;
- starších pacientov;
- vysušenej sliznice spôsobenej centrálnym vykurovaním alebo klimatizáciou;
- pobytu v zafajčenom prostredí.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Vedľajšie účinky zdravotníckej pomôcky COLDISEPT nanoSILVER nosový sprej nie sú známe, napriek tomu však, najmä u citlivých osôb, nie je možné vylúčiť alergické príznaky. V prípade, že sa objaví alergická reakcia, ukončíte používanie produktu.

Akákkoľvek závažná udalosť súvisiaca s touto zdravotníckou pomôckou musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému národnému orgánu.

Príslušný národný orgán pre zdravotnícku pomôcku v SR: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná ul. 11, SK-825 08, Bratislava 26.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na ktorúkoľvek jeho zložku.

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na kovové striebro. Zabráňte kontaktu s očami.

Ukončíte používanie prípravku v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti!

V prípade kontaminácie vyberte aplikátor, opláchnite ho a vyvarujte alebo ho dôkladne opláchnite vriacou vodou.

Tehotné ženy a deti do 6 rokov môžu prípravok používať len pod lekárskej dohľadom.

Prípravok môže byť používaný dlhodobou bez rizika návyku, vedľajších účinkov a komplikácií.

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Prípravok používajte 3-4 x denne podľa individuálnej potreby.

Pred prvým použitím stlačte dávkovač niekoľkokrát.

Vložte aplikátor do nosovej dutiny.

Aplikujte 1-2 dávky do každej nosovej dierky.

UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Balenie 20 ml

VÝZNAM SYMBOLOV:

	Číslo šarže		Pozri návod na použitie		Výrobca
	Použiteľné do		Dátum výroby		Horná hranica teploty

Dátum poslednej revízie textu: 1.9.2020